

Bruksanvisning

Multi burken drogtest

Ta ur testet från förpackningen. Se även till att datumet för sista användningsdag inte överskridit. Testet är fukt känsligt och ska vara förpackat fram till användande. Se till att urinprovet uppnått rumstemperatur (15-30 °C) före testning.

1. Ta ut drogtestet från förpackningen och använd den ganska omgående då testerna fukt känsliga.
2. Öppna locket på behållaren. Provet kan sedan lämnas direkt i behållaren. Fyll i ID-märkningen på behållarens sida (namn, datum och provansvarig).
3. Sätt tillbaks locket på testet och dra av etiketten för att avläsa resultatet, passa även på att kontrollera temperaturen på urinen med hjälp av den svarta remsan längst ner på burken, normalt är 33-37 °C.
4. Placera burken på en plan yta, ta tiden och vänta tills dem röda linjerna framträder. Resultatet ska kontrolleras efter 5 minuter. Tolka inte resultatet efter 15 minuter.

Negativt Resultat:



Två röda linjer syns i avläsningsfönstret: En testlinje (T) per drog och en kontrollinje (C) som bekräftar att tillräcklig mängd vätska sugits upp till provet. Styrkan på testlinjen kan variera och vara svagare eller starkare än kontrollinjen.



Positivt Resultat



Endast en röd linje uppstår i kontrollområdet (C). Frånvaron av en linje i testområdet (T) indikerar ett positivt resultat för drogen i fråga. Låt **8** minuter passera innan testet förklaras positivt. OBS! Testet ger endast preliminärt resultat. Verifiera positiva resultat hos ackrediterat laboratorium.

Ogiltigt Resultat



Kontrollinje saknas. Otillräcklig mängd urin har sugits upp i remsan, felaktigt förvarat eller för gammalt test eller inkorrekt testprocedur är mest sannolika skäl för utebliven kontrollinje. Gå igenom testrutinerna igen och upprepa med nytt test.